



LAGERUNG, TRANSFER & HYGIENE IN DER PFLEGE

Mehr Ergonomie, weniger Belastung –
MK Nuage für eine sichere Patientenlagerung und hygienische Transfers.

EINLEITUNG

Jeder Handgriff in der Pflege zählt – sei es beim Positionieren, Transferieren oder Reinigen von Hilfsmitteln.

Pflegekräfte stehen täglich vor der Herausforderung, ihre Patient:innen bestmöglich zu mobilisieren, ohne dabei die eigene körperliche Belastung aus den Augen zu verlieren. Gleichzeitig spielt Hygiene eine zentrale Rolle, um Infektionen zu vermeiden und die Sicherheit im Pflegealltag zu gewährleisten.

Das MK Nuage-System bietet eine durchdachte Lösung, die nicht nur für die Patient:innen, sondern auch für Pflegekräfte eine spürbare Erleichterung bedeutet. Von der einfachen Reinigung bis hin zum rückschonenden Arbeiten – dieses Whitepaper zeigt, wie die richtige Lagerungshilfe den Pflegealltag effizienter macht.

01

MOBILISATION VON PATIENT:INNEN: SICHERES MOBILISIEREN FÜR ALLE

Die Mobilisation von Patient:innen ist ein entscheidender Faktor für ihr Wohlbefinden. Bewegung fördert die Durchblutung, beugt Druckgeschwüren vor und steigert das allgemeine Lebensgefühl.

Genau hier setzt das MK Nuage-System an:

Die ergonomische Gestaltung sorgt für eine stabile und gleichzeitig angenehme Sitz- und Liegeposition, sodass Patient:innen sich sicherer fühlen und sich leichter an Bewegungen gewöhnen. Die innovative Konstruktion trägt dazu bei, dass Positionswechsel sanfter verlaufen und den Körper optimal unterstützen.



02

RÜCKENSCHONENDES ARBEITEN: EINFACHER TRANSFER IN DEN ROLLSTUHL

Mehr Sicherheit für Patient:innen, da unkontrollierte Bewegungen oder Stürze vermieden werden.



Erhebliche Entlastung

Für Pflegekräfte und Angehörige bedeutet das eine erhebliche körperliche Entlastung, weniger Stress und mehr Zeit für die eigentliche Betreuung – ein echter Gewinn für die Gesundheit und den Arbeitsalltag.



Werkzeuglose Anpassung

Alle Anpassungen lassen sich intuitiv und ohne zusätzliches Werkzeug vornehmen.



Integrierte Sitzkantelung und Rückverstellung

Die integrierte Sitzkantelung und die Rückenverstellung ermöglichen eine ergonomische Positionierung, wodurch der Transfer fließender verläuft und weniger Kraftaufwand erfordert.



Erleichterung des Transfers

Der Transfer von Patient:innen ist oft mit schwerem Heben und unbequemen Bewegungen verbunden – eine erhebliche Belastung für den Rücken von Pflegekräften und Angehörigen. Die Anbauteile der Nuage, wie z.B. Armlehnen und Beinstützen sind mit Schnellverschlüssen einfach abnehmbar, was die Benutzung eines Patientenlifters ohne Hindernisse schnell ermöglicht.

03

HYGIENE & PFLEGE DES HILFSMITTELS: SICHERHEIT FÜR ALLE

Die Reinigung und Desinfektion von Lagerungshilfen ist ein essenzieller Bestandteil des Pflegealltags. Ein sauberes System bedeutet nicht nur besseren Schutz vor Infektionen, sondern auch eine längere Lebensdauer des Hilfsmittels.

Das MK Nuage-System wurde so entwickelt,

dass die Materialien eine einfache Reinigung ermöglichen. Die Bezüge und Polster sind speziell darauf ausgelegt, abwaschbar und desinfizierbar zu sein, wodurch eine schnelle und unkomplizierte Pflege gewährleistet wird. Die Oberflächen sind feuchtigkeitsabweisend und verhindern das tiefe Eindringen von Schmutz, sodass das System jederzeit hygienisch bleibt.



Feuchtigkeitsabweisend

Leicht zu reinigende Polster

Desinfizierbare Oberflächen

Kein Eindringen von Schmutz

Zusätzlich erfüllt das MK Nuage-System höchste Hygienevorschriften und Normen, um eine sichere Nutzung im Pflegebereich zu gewährleisten. Pflegenden profitiert dadurch von einem geringeren Reinigungsaufwand, mehr Sicherheit für ihre Patient:innen und einer allgemein erleichterten Pflegeorganisation.

04

TRANSFERPROZESSE VERSTÄNDLICH GEMACHT – VISUELLE GESTALTUNG

Ein gut durchdachter Transferprozess reduziert Fehlerquellen und erleichtert den Alltag enorm. Das MK Nuage-System bietet eine intuitive Handhabung, die sich schnell erlernen und umsetzen lässt. Durch klar strukturierte visuelle Anleitungen und einfache Einstellungsmöglichkeiten können Pflegekräfte den Transfer optimal anpassen, was sowohl die Sicherheit als auch die Effizienz im Pflegealltag verbessert.

Die Vorteile für Pflegekräfte sind dabei vielfältig: Der Zeitaufwand wird durch die einfache Handhabung und schnelle Anpassung erheblich reduziert. Gleichzeitig steigt die Sicherheit für Patient:innen, da durch die stabilen Positionierungsmöglichkeiten das Risiko für unkontrollierte Bewegungen minimiert wird. Effizientere Abläufe und ein durchdachter Transferprozess sorgen zudem für eine nachhaltige Entlastung im Pflegealltag.



FAZIT

MK NUAGE SETZT NEUE MAßSTÄBE

Das MK Nuage-System setzt neue Maßstäbe für eine effiziente, sichere und hygienische Pflege.

Es erleichtert die Mobilisation, reduziert die körperliche Belastung von Pflegekräften und Angehörigen und ermöglicht eine unkomplizierte Reinigung – damit der Fokus auf das gelegt werden kann, was wirklich zählt:

Die bestmögliche Betreuung und ein würdevoller Alltag für die Patient:innen.



Kontakt



+49 341 30 85 48 25



MK Medizintechnik GmbH
Karlsruher Straße 36
04209 Leipzig



info@mk-medizintechnik.de

**MK Nuage –
Entlastung,
Sicherheit und
Hygiene für den
Pflegealltag!**